


CuratOR® SC431-CCU / CuratOR® SC431-CH

操作指南

摄像机云台镜头操作

注意 请务必使用 CCU 控制板或遥控器来操作摄像机云台镜头的驱动装置。手动移动它可能会损坏产品，使其无法正常工作。

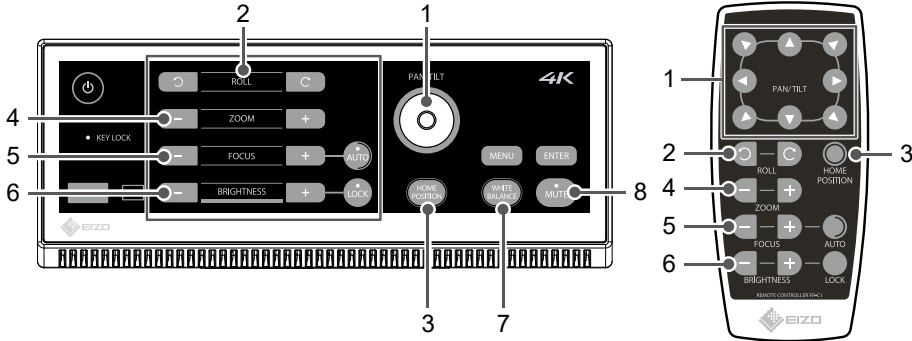

1. PAN / TILT	操作摄像机云台镜头的平面旋转 / 俯仰旋转功能。 将操纵杆向某个方向推动，摄像机云台镜头就会朝该方向移动。对于遥控器，按下按钮时，摄像机云台镜头就会朝着按钮所指示的方向移动。
2. ROLL	对摄像机云台镜头执行轴向旋转操作。 ↺：逆时针旋转，↻：顺时针旋转
3. HOME POSITION	长按按钮（约两秒钟）可将摄像机云台镜头恢复到其原始位置。
4. ZOOM	对摄像机云台镜头执行变焦操作。 “+”：长焦方向，“-”：广角方向
5. FOCUS	对摄像机云台镜头执行对焦操作。 “+”：向更远的距离对焦，“-”：向更近的距离对焦 按下“AUTO”按钮：一键自动对焦 长按“AUTO”按钮（约两秒钟）：实时自动对焦 当实时自动对焦处于工作状态时，按下“AUTO”按钮可切换到一键自动对焦。按下“+”和“-”按钮可切换到手动对焦。 “AUTO”按钮上的 LED 根据对焦操作状态而变化。 - 绿色闪烁：一键自动对焦 - 绿色常亮：实时自动对焦 - 关闭：手动对焦 注 - 拍摄固定距离的对象时，建议使用一键自动对焦或手动对焦。使用实时自动对焦可能会导致对焦不稳定。
6. BRIGHTNESS	用于调节亮度。 按下“+”和“-”按钮可更改图像的亮度。按下“LOCK”按钮可固定亮度。“LOCK”按钮上的 LED：绿色常亮 注 重新启动设备时，锁定状态将被解除。
7. WHITE BALANCE	自动校正由光源颜色影响引起的色差。 长按“WHITE BALANCE”按钮（约两秒钟），该点的白平衡将保持不变。按下该按钮时，在要使用的实际照明条件下在整个屏幕上拍摄消色差拍摄对象（反光物体、白纸等）的照片。
8. MUTE	将摄像机云台镜头的内置麦克风静音。

菜单操作

